

# ISTRUZIONE UTILIZZO MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICHE

## Come indossare la mascherina di tipo chirurgico

Qui di seguito trovi le istruzioni da seguire per indossare/rimuovere la mascherina:

- Prima di indossare la mascherina, lava accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- Indossa la maschera facciale avendo cura che aderisca bene al volto coprendo bocca e naso
- Allaccia la mascherina dietro le orecchie/testa con gli appositi lacci stringendoli se necessario
- Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lava le mani
- Prima di rimuovere la mascherina lava accuratamente le mani
- Rimuovi la mascherina con cautela prendendola dai lacci o dalla parte interna senza toccare la parte anteriore e gettala immediatamente in un sacchetto chiuso
- Smaltisci il sacchetto chiuso nella raccolta indifferenziata
- Lava accuratamente le mani

### INDOSSARE LA MASCHERINA


1. Lavati le mani accuratamente




2. Orienta la mascherina in maniera corretta




3. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno

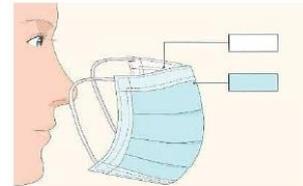

4. Allaccia la mascherina dietro le orecchie/testa

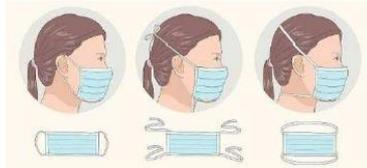

5. Sistema la mascherina sul naso e sotto il mento

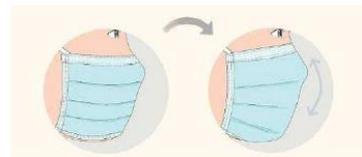

### RIMUOVERE LA MASCHERINA

1. Lavati le mani accuratamente



2. Rimuovi la mascherina con cautela e gettala in un sacchetto chiuso nella raccolta indifferenziata



3. Lavati nuovamente le mani

